

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie pre používateľov. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára, alebo lekárničku.

Výrobca: NeilMed ® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

PediaMist NeilMed - detský sprej pre hydratáciu nosa a jeho oplach

PediaMist je prírodný, soľný roztok pre hydratáciu nosa a pre jeho oplach. Tento neprenikavý soľný sprej pomáha zmierniť alergickú nádchu, suchosť, kvapkánie z nosa a prekrvenie nosovej sliznice, ktoré môžu spravidla prechladnutie, alebo chrípku. Upokojuje, hydratuje a čistí.

Obsah balenia:

- 1x fľaša s objemom 75 ml (2,53 fl oz)
- edukačná brožúra a návod na použitie

PediaMist sprej pomáha zmierniť:

- nosové alergie a suchosť
- sinusitídu, nádchu
- alergickú astmu
- problémy s odkvapkávaním z nosa
- tlak v dutinách a prekrvenie nosovej sliznice
- nosové príznaky pri chrípke a prechladnutí
- podráždenie nosa pracovným a domácim prachom, dymom, zvieracou srstou, trávou, peľom a fajčením

Návod na použitie PediaMist sprej

1. Vložte špičku nástavca do nosovej diery a jemne stlačte, kým nedôjde k uvoľneniu požadovaného objemu pokiaľ nie sú nosové diery vlhké.
2. Postup opakujte pre druhú nosovú dierku (u dočiat a detí nevkladajte trysku priamo do nosa za jeho vonkajší okraj).

Používajte tak často, ako často je potreba zvlhčovať.

Varovanie

- Z dôvodov zníženia rizika kontaminácie sa odporúča prípravok používať len jedným používateľom.
- Pri používaní nezablokujte úplne nosové priechody, vyhnite sa tak tlaku v nose alebo ušiach.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Obsah je pod tlakom, prosím neprepichujte ani nespájajte ho.
- Skladujte pri teplotách medzi 5 až 55 °C, mimo slnečného žiarenia a mimo dosahu zdrojov tepla.
- Poradte sa s lekárom pred použitím u detí mladších ako šesť mesiacov.
- Nenechajte prípravok zmraziť.

Nosové spreje nemôžu byť považované za plnohodnotný oplach a premytie nosových a prínosových dutín. Na to slúžia prípravky spojené s použitím veľkého objemu tekutiny (Sinus Rinse).

Dovozca:

ASCOMED, s. r. o.
Pod Cihelnou 664/6
161 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +420 233 313 578
www.ascomed.cz

Názvy produktov: NeilMed, Sinus Rinse, NasoGel, Clearcanal, NasaMist, Naspira, Neilcleanse sú registrovanými ochrannými značkami.

Všetky uvedené produkty patria medzi zdravotnícke pomôcky nehradené zo zdravotného poistenia. Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte priložený návod na použitie.

