

NasoGel® Sprej

Prosím přečtěte si před prvním použitím následující doporučení.

Naso Gel® umožňuje zvlhčení a zklidnění suchých nosních průchodů.

Suchost může být způsobena:

- vnitřním vytápěním
- klimatizací
- cestou v letadle
- vysokou nadmořskou výškou
- používáním kyslíku.

Doporučuje se používat i při post radiační terapii a po operaci dutin.

Suchost nosní sliznice může vést až ke krvácení z nosu, změnám vnímání vůní a chuti, bolestem hlavy, infekcím nosu a celkovému pocitu nepohodlí.

NasoGel Sprej je velmi snadné používat, obsahuje vhodný rozprašovač gelu:

Krok 1: Sundejte víčko z rozprašovače

Krok 2: Odstraňte modrou bezpečnostní sponu

Krok 3:

- a.) zmáčkněte pumpičku dvěma prsty a držte ji v dolní pozici po dobu 4 sekund.
- b.) povolte pumpičku
- c.) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, dokud nevystříkne gel.

Důležité: Musíte zmáchnout a držet pumpičku v dolní pozici po celé 4 vteřiny, protože jen tak bude mít pumpička tu správnou výkonnost!

Krok 4: Po naplnění pumpičky je Gel připraven k rozprašování.

Krok 5: Aplikujte 2-4 dávky NasoGel® spreje do každé nosní dírky každých 4-6 hodin. V případě přetrvávající suchosti můžete aplikovat gel častěji, nebo navštívit svého lékaře.

Krok 6: Umístěte zpět víčko i bezpečnostní sponu abyste zamezili vysychání přípravku. Pumpička zůstane připravena k užití několik dnů. Jakmile však dojde ke ztrátě tlaku, je znovu třeba ji připravit k dalšímu užití (Krok 3)

Obsah: 1 lahev 45 ml. Hyaluronát sodný, aloe vera, alantoin, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, glycerin, propylenglykol, USP tř. Čištěná voda. Benzalkonium chlorid je přidán jako konzervační látka.

Varování:

Chraňte před dětmi. Skladujte na suchém, studeném místě, chraňte před zmraznutím. Používejte tak, jak je doporučeno výše.

Nepoužívejte při pocitu suchosti v ústech. Nepoužívejte, pokud byl obal při koupi porušen.

Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergičtí na některou látku obsaženou v přípravku (viz obsah).

Dovozce:

ASCOMED s.r.o.

Pod Cihelnou 6/664

161 00 Praha 6

Tel.: +420 233 313 578

www.ascomed.cz