

Příbalová informace pro uživatele

Přečtěte si před prvním použitím pozorně tuto příbalovou informaci. V případě dalších otázek se obraťte na svého lékaře, nebo lékárníka.

Výrobce: Neil Med®PHARMACEUTICALS,INC. 601 AVIATION BVLD,Santa Rosa,CA 95403 USA

NeilMed® NeilCleanse™ WoundWash Saline Spray-sprej na čištění ran

Izotonický roztok, bez drog a konzervačních látek, nepálí, neštípe

Neilcleanse™ je sterilní fyziologický roztok, který očišťuje drobné rány a odřeniny, aniž by páčil nebo štípal. Sprejuje v jakékoliv pozici.

Obsah balení:

1 Neilcleanse™ WoundWash Saline sprej (177 ml) Sterilní, izotonický roztok bez konzervačních látek

Používejte pouze podle pokynů, při přetrvávajících potížích navštívte svého lékaře.

Návod k použití:

Indikace:

Očištění drobných rán a odřenin.

Výhody:

Sterilní, bez drog a konzervační látky

Nepálí, neštípe

Přenosný, vhodný pro cestování

Při úplně prvním použití:

Zkuste bílou plastovou hlavu zvednout ze strany mírným tahem. V případě, že plastová hlava nejde snadno nazdvihnout, karta je neporušená. Pokud se plastová hlava nazdvihne, karta je rozbitá a sprej by neměl být používán. Po ujištění se o neporušenosti karty postupujte podle pokynů.

Návod k použití

Před použitím stříkněte krátký proud Wash Saline Spray™ do vzduchu nebo na neporušenou kůži abyste otestovali proud a vyčistili trysku.

Stříkejte na postiženou oblast ze vzdálenosti 5-10cm nebo tak, nebo jak je vám to pohodlné.

Po každém použití uzavřete čistým víčkem.

Složení:

Čištěná voda, chlorid sodný (9mg/ml)

Varování:

Nepoužívejte na popáleniny. Nepoužívat na ústní otvory, zvukovody, oči nebo ústa.

Ne pro injekční použití.

Pouze pro individuální použití.

Používejte podle potřeby. Konzultujte se lékařem při dlouhodobém ošetřování ran a pro použití u dětí mladších 2 let.

Obsah je pod tlakem; neprorázejte, nepalte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte při teplotě mezi 5 ° -27 ° C, mimo sluneční světlo a mimo zdroje tepla. Nesmí zmrznout.

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Pokud se zarudnutí, otok nebo bolest zhoršuje, prosím požádejte o radu svého zdravotníka.

Dovozce:

ASCOMED s.r.o.

Pod Cihelnou 6/664

161 00 Praha 6

Tel.: +420 233 313 578

www.ascomed.cz